


## ARTHRO BITE ZERLEGBAR ARTHRO BITE DETACHABLE

Die im Schaft integrierte Spüloase ermöglicht eine bestmögliche Reinigung der Instrumente

*The narrow slot in the shaft enables optimal cleaning of the instruments*

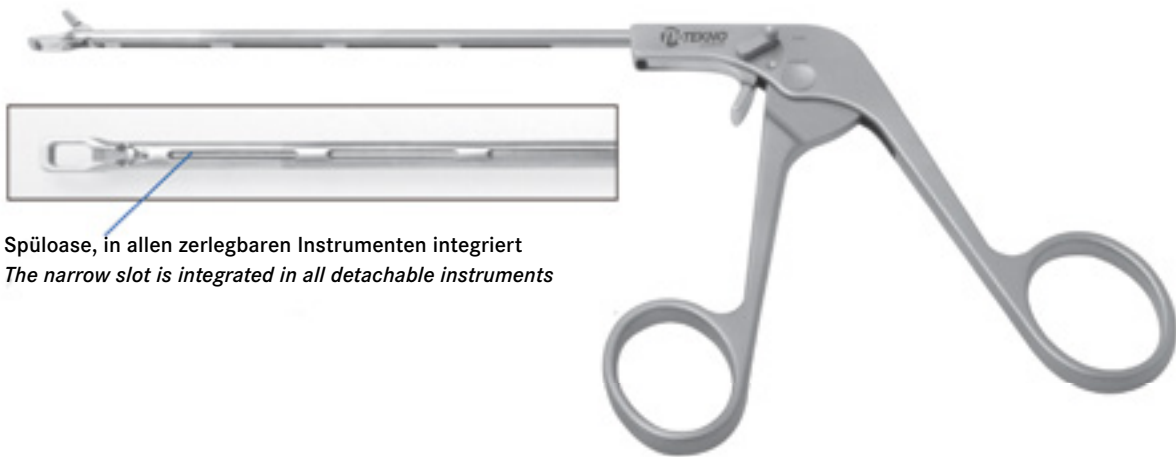

Spüloase, in allen zerlegbaren Instrumenten integriert  
*The narrow slot is integrated in all detachable instruments*



**2-teilig zerlegbar  
Zangenaufsatz und Griff**  
*2-part detachable  
Tip and handle*

# ARTHRO BITE ZERLEGBAR ARTHRO BITE DETACHABLE

## Zerlegen der Instrumente Disassembling of the instruments

Sicherungshebel öffnen (von lock auf unlock)  
 Open the locking button (from lock to unlock)



Fixierungshebel öffnen (nach unten/vorne ziehen)  
 Open the fixing lever (pull down/forward)



Griff schließen, Schaft nach vorne ziehen und entnehmen  
 Close the handle, pull the shaft to the front and remove




Für unsere gesamte Produktlinie fordern Sie bitte unseren Katalog an.  
 For complete product range, please request our catalogue.

## Montage der Instrumente Assembling of the instruments

Griff schließen  
 Close the handle



Schaft einlegen und Griff öffnen  
 Insert the shaft and open the handle

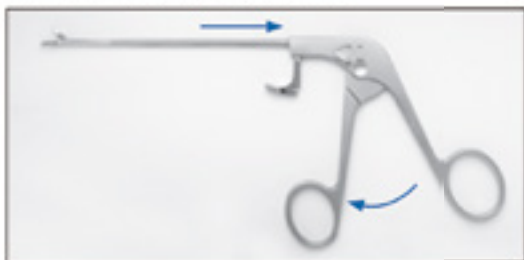

Stanzmaul ausrichten (Strich muss auf den Pfeil)  
 Adjust the insert (line must point to the arrow)



Fixierungshebel schließen (nach hinten / oben drücken)  
 Lock the fixing lever (push backwards / upwards)

Sicherung schließen (von unlock auf lock)  
 Close the locking button (from unlock to lock)

